

WOCK®

Professional Footwear

このたびは『 WOCK clog 』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品をより快適にお履きいただくために、ご使用前に下記事項をよくお読みください。末永くご愛用いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

製品概要

WOCK clog は、活動的に生活を送る人々のためにデザインされたプロフェッショナルフットウエアです。耐久性に優れており、様々なシーンで活躍します。人体に無害のレモン香を施しておりますが、使用に伴い薄れ、永続的なものではありません。

特徴




通気性：本体側部とインソールにある通気口により通気性が向上します。



スリップ防止：濡れた地面等におけるスリップのリスクを低減します。



洗浄可能：本体およびインソールは洗浄が可能です。（水温 90℃まで）

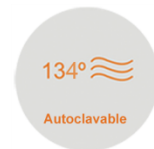

高圧蒸気滅菌：（医療現場において）134℃までの高圧蒸気滅菌が可能です。



帯電防止：本体底部のプラグが使用中に帯びた電気を消散し、静電気の発生を低減します。



衝撃吸収：インソール内蔵で、足、膝、腰への衝撃を和らげます。

取り外し可能インソール

スリップ防止構造



通気口

帯電防止プラグ

使用上の注意

使用時には靴下の着用をお勧めします。また、クエン酸、ひまわり油、油圧オイル、銹物油、ガソリン、軽油等の溶剤により損傷を受けますのでご注意ください。WOCK clog は、耐久性に非常に優れ、長期間にわたりご使用いただけますが、地面、床材の種類、使用環境、活動量等の条件により製品寿命が変わります。予めご了承ください。

お手入れ方法

日常のほこりや砂などはナイロン製のブラシで軽く払ってください。汚れがひどいときは、ブラシやたわしを用い中性洗剤や洗濯用洗剤等で洗って下さい。（注：強く擦ると製品を損傷する可能性がありますのでご注意ください）

更にしつこい汚れには、本体からインソールを取り出し、本体とインソールを温水に一時間程浸してください。その後、柔らかいブラシ等で汚れを除去してください。また、常温で乾燥させ、熱源には近づけないでください。

WOCK は Procalçado SA の商標登録です

(WOCK 輸入発売元)



Mihama Medical, Inc.

株式会社 ミハマメディカル

〒112-0013 東京都文京区音羽2-11-19 オトワKSビル4階
TEL:03-5981-0561 FAX:03-5981-0563

(製品出荷元)

日本配送システム株式会社 物流センター
〒351-0101 埼玉県和光市白子 3-35-1
Tel : 048-451-3025